



# Erste Schritte.

EY-LO läuft am einfachsten auf dem **iPad** — direkt aus dem App Store. Für **Mac** und **Windows** gibt es sie ebenfalls; die passenden Installationsdateien liegen zusätzlich auf diesem USB-Stick.

## EMPFOHLEN · IPAD MIT M-CHIP

- 01 App Store** öffnen, nach „**EY-LO**“ suchen und die App laden.
- 02** Kamera-Kabel in den **USB-C-Port** des iPads stecken.
- 03** EY-LO öffnen — fertig. Kein Account, keine Installation, keine Treiber.

**Weiter bei Schritt „Kamera am Kopf aufbauen“** auf der nächsten Seite. Der iPad-Weg ist die schnellste und robusteste Lösung.

## ALTERNATIVE · LAPTOP (NUR BEI BEDARF)

### MAC

**Mac App Store** öffnen, nach „**EY-LO**“ suchen und laden.

Schon fürs iPad geladen? Dann ist sie hier **gratis** dabei (ein Kauf für iPad + Mac).

Geht der App Store nicht: die **EY-LO-Datei (.dmg)** auf diesem Stick öffnen und **EY-LO** in den Ordner **Programme** ziehen.

Beim ersten Start **Kamera-Zugriff erlauben**.

### WINDOWS

**EY-LO-Setup.exe** auf diesem Stick doppelklicken und den Installer durchklicken.

Bei SmartScreen-Hinweis: **Weitere Informationen** → **Trotzdem ausführen**.


Beim ersten Start **Kamera-Zugriff erlauben**.



# Kamera & Kabel.

## KAMERA AM KOPF AUFBAUEN

- 01 Vom **Kamera-Arm** kommend eine kleine **Service-Schleife** lassen — gibt Bewegungsfreiheit und entlastet den Stecker.
- 02 Kabel am **Kopfband** entlang über den Kopf nach hinten führen.
- 03 Hinten durch die **Halterung am Kopfband** ausführen (siehe Skizze).
- 04 Kopfband aufsetzen, Sitz und Neigung justieren.
- 05 **Kabelclip** an der Kleidung befestigen (Zugentlastung).

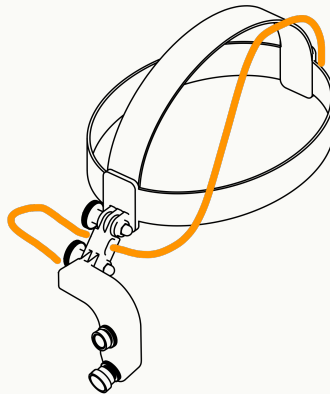

Kabelführung: Service-Schleife vorn, dann über das Kopfband nach hinten.

## ANSCHLIESSEN

- 01 Kamera-Kabel anschließen — iPad: **USB-C**, Laptop: **USB**.
- 02 EY-LO starten — **Wide** und **Macro** werden automatisch erkannt.
- 03 Falls Wide/Macro vertauscht: oben rechts → **Einstellungen** → Kameras tauschen.

## KAMERA AUSRICHTEN

- 01 Am Patienten durch die Lupenbrille auf **einen einzelnen Zahn** schauen.
- 02 **Macro-Kamera (untere)** möglichst nah und parallel zu den Lupenokularen positionieren.
- 03 So justieren, dass der **Ziel-Zahn mittig** im Bild sitzt.
- 04 **Schärfe** der Macro-Kamera durch **Drehen am Objektiv** auf den eigenen Arbeitsabstand einstellen.



# Loslegen.

## AUFNEHMEN

- 01 Aufnahme** oder **Schnappschuss** direkt in der App starten.
- 02** Für mehr Übersicht den Bildschirm per **AirPlay** oder **HDMI-Adapter** auf einen größeren Monitor erweitern.

**Kameras vertauscht oder Aufnahme-Ordner ändern?** Alles oben rechts unter **Einstellungen**. Dort lässt sich auch die Erst-Einrichtung jederzeit erneut starten.

## HILFE & SUPPORT

Fragen oder Probleme? Wir helfen gern weiter:  
**support@ey-lo.com**